

Портативный аппарат безинъекционной мезотерапии



Руководство пользователя

Аппарат предназначен для проведения процедур электропорации в салонах красоты, медицинских клиниках.

Аппарат безигольной мезотерапии. Выгодное вложение.

Аппарат окупиться максимум за 10 сеансов.

Начните зарабатывать, оказывая качественные услуги с минимальными вложениями.

В основе работы аппарата находятся принципы электропорации и электроосмоса (безыгольной мезотерапии), без инъекций. Процедуры на аппарате легко открывают аквапорины (AQP), способствуют транспортировке питательных веществ в кожу, поэтому могут применяться для лечения всех видов кожных заболеваний. Для достижения эффекта от применения аппарата требуется «точка-инфильтрат», с помощью которой осуществляется транспортировка сыворотки непосредственно в кожные ткани. Сыворотка быстро и эффективно поглощается, содействуя метаболизму кожи, сохраняя ее упругой и эластичной.

Что такое электропорация и электроосмос?

Электропорация непосредственно воздействует на кожу, интенсивно повышая проницаемость кожных покровов. Под воздействием эффекта от электрошока формируются инфильтраты в липидных мобилизаторах клеток и в то же время гидрофильные молекулы, которые не были абсорбированы первоначально, могут проникать во внутренние структуры клеток. После образования инфильтратов в период от нескольких секунд до нескольких минут они будут открыты в соответствии с длиной и гибкостью электрошока.

Принцип действия электроосмоса состоит в активизации молекул вещества, которые способны поставлять положительный ток положительно заряженным молекулам.

Показания к применению:

1. Общее улучшение состояния кожи:

- жирная кожа, расширенные поры, уплотнения и инфильтраты;
- улучшение цвета лица, снятие синдрома усталости, насыщение кожи кислородом;
- зрелая, обезвоженная кожа, морщины, сухость кожных покровов.

2. Уход за кожей вокруг глаз:

- темные мешки под глазами, морщины, отеки;
- детоксикация, уменьшение видимости капилляров.

Эффекты от процедур:

1. Удаление веснушек и отбеливание кожи. Открытие каналов, способствующих активному метаболизму в клетках и отвечающих за их омоложение.

2. Разглаживание морщин.


3. Лечение акне. Безыгольная мезотерапия для лица с помощью питательного раствора для мезо - инъекций

Быстрое удаление морщин при помощи косметического аппарата индукционного типа.

Аппарат для идеального насыщения кожи лица полезными препаратами, при этом клиент не испытывает мучительной боли и сам аппарат очень прост в применении. Что выгодно скажется на положительном решении клиента сделать данную процедуру, ведь боль отсутствует. Данная методика является новшеством в индустрии красоты, что поможет привлечь вам новых клиентов.

Панель управления

1. время (-) уменьшение
2. интенсивность (-) уменьшение
3. интенсивность (+) увеличение
4. время (+) увеличение
5. Stop/Start остановка/включение

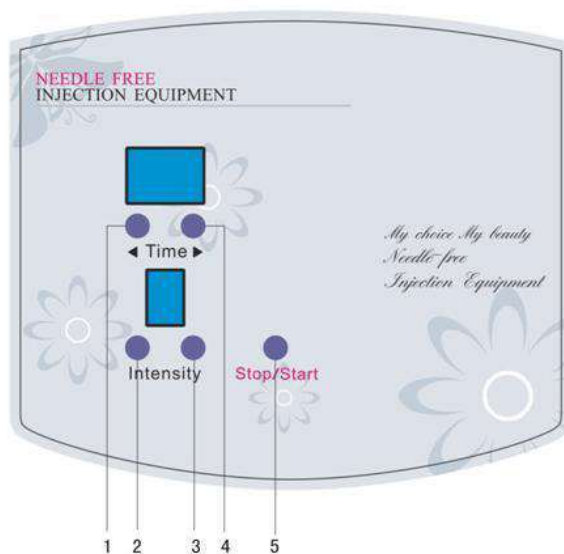

Аксессуары



Рабочая манипула




Контактная манипула



ампула для препарата

1) Рабочая манипула : Предназначена для проведения процедуры электропорации. **2)** Контактная манипула: Для проведения процедуры необходимо дать контактную пробу в руки пациента, только в этом случаи появиться возможность проведения импульса.

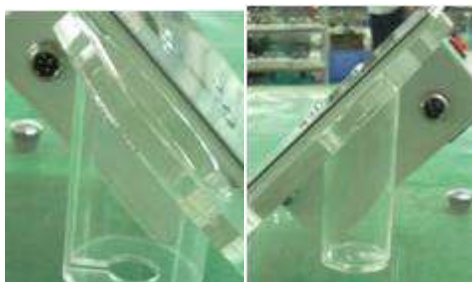

Рабочая манипула устанавливается слева, контактная справа на базе.

1. Подключите манипулы в соответствующие разъемы.
2. подключите кабель питания.
3. нажмите кнопку включения питания на задней панели прибора.
4. вложите контактную манипулу в руку пациента.
5. заполните ампулу активным препаратом и вставьте в рабочую манипулу.
6. очистите лицо пациента.

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПИРТОВЫЕ РАСТВОРЫ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ,
ВОЗМОЖНО ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ПАРОВ СПИРТА!!!**

7. Увлажните кожу пациента любым мезо препаратом или токопроводящим гелем.
8. Постепенно, начиная с минимума отрегулируйте мощность импульса, полагаясь на индивидуальные ощущения пациента.
9. Проведите процедуру электропорации в соответствии с протоколом к препарату.

Параметры:

Напряжение: 220В

Частота: 50 Гц

Мощность: 100 Вт

Упаковка: 38 x29 x21см

Вес брутто / N.W. 3,2кг